

Instruktioner för lyftselar

Ta alltid kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast om brukarens vikt, funktionsnivå eller behov förändras då det kan påverka säkerheten vid användning av lyftselen.

- Lyftselar finns i olika modeller och storlekar. Det är viktigt att lyftselen är **individuellt** utprovad av arbetsterapeut eller sjukgymnast.
- Det ska finnas en akutlyft med tillhörande uppmärkt lyftsele som kan användas i akuta situationer. Så snart som möjligt ska dock kontakt tas med arbetsterapeut/sjukgymnast för individuell utprovning.
- Följ alltid utprovningsprotokollet som arbetsterapeut/sjukgymnast har skrivit.
- Kontrollera att lyftselen är hel. Titta på tyget, sömmar och upphängningsöglor. Är något trasigt får det inte lagas utan ska bytas ut mot en ny lyftsele.
- Kontrollera att öglorna sitter ordentligt fast i lyftbygeln
- Följ tvättråden som finns på lyftsele.